



- Диапазон измерения:
 - 0 - 0,1 промилле (Зелёный индикатор)
 - 0,1 - 0,2 промилле (Жёлтый индикатор)
 - более 0,2 промилле (Красный и жёлтый индикаторы)
- Встроенный светодиодный фонарик
- Цепочка для ключей
- Питание от 2хAAA батареек (в комплект не входят)

СВЕТОДИОДНИ

Алкотестер

светодиодный

- Проводите тестирование не ранее чем через 20 минут после употребления алкоголя.
- Перед следующим тестированием подождите 3 минуты
- Не курите и не употребляйте продукты 20 минут перед тестированием
- Не используйте активные вещества и растворители для чистки устройств
- Не выдыхайте жидкость в устройство
- Не храните рядом с алкоголем, красками, инсектицидами.
- Не храните в закрытом помещении с загрязненным воздухом
- Для длительной службы устройства, используйте его не чаще одного раза в сутки
- Наличие в воздухе выхлопных и других газов может исказить результат теста
- Запрещается вскрывать и изменять устройство
- Персональный алкотестер предназначен только для индикации возможного присутствия алкоголя в крови и выдыхаемом воздухе. Не следует считать полученные показания окончательными и безупречно точными в определении уровня интоксикации. Также, основываясь на результатах измерений, не следует принимать решение допустима ли полученная концентрация алкоголя при вождении автомобиля, работы на производстве или деятельности, сопряженной с опасностью. Организм каждого человека по-разному реагирует на одинаковую концентрацию алкоголя, поэтому результаты измерений являются только ориентальными значениями, а не нормами стандарта.
- Перед началом работы с прибором внимательно изучите инструкцию по эксплуатации.