

TAKASIMA



МАССАЖНОЕ КРЕСЛО Venerdi Amato



Руководство пользователя



Благодарим за приобретение массажного кресла Venerdi Amato.

Перед началом использования ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Уделите особое внимание разделу «меры безопасности».

СОДЕРЖАНИЕ







Применение	4
Меры безопасности	4
Схема установки	8
Внешние элементы	10
Внутренние элементы	10
Пульт управления	11
Обозначения ВФД-дисплея	13
Метод работы и схематичное описание функций	14
Часто задаваемые вопросы. Поиск и устранение неисправностей	17
Технические параметры	17
Схема расположения механических деталей	18
Перечень механических деталей	19

ПРИМЕНЕНИЕ




1. Функция распознавания тела позволяет выполнить более точный массаж, учитывая рост и форму тела пользователя.
2. S-образная форма спинки кресла соответствует изгибам человеческого тела: четырехроликовый массажный механизм способствует наиболее комфортному проведению массажа.
3. Роликовый, разминающий, давящий, точечный и постукивающий массаж в области головы, шеи, спины и талии поможет избавиться от усталости и снять общее напряжение.
4. 7 воздушных подушек по обе стороны сиденья. Возможность выбора режима воздушно-компрессионного массажа позволит Вам быстро избавиться от усталости.
5. 16 воздушных подушек в области ног и 8 воздушных подушек для области стоп обеспечивают пульсирующий сдавливающий массаж ног и стоп, комфортно и деликатно способствующий улучшению кровообращения.
6. Функция прогрева в области талии и ступней способствует улучшению кровообращения и устранению усталости, разогревая и расслабляя тело.
7. Верхняя крышка подлокотника легко открывается/закрывается. На каждом из двух подлокотников имеется по 2 группы воздушных подушек. При открытой крышке выполняется массаж рук, а при закрытии крышки она естественным образом соединяется с подлокотником.
8. Управление с помощью широкоугольного люминесцентного дисплея (ВФД), наличие активной защелкивающейся крышки и интеллектуальной системы звуковой и световой навигации. Для выбора предпочтительной программы массажа необходимо открыть крышку.
9. Отрегулируйте спинку кресла и опору для ног с помощью электропривода: угол наклона спинки и опоры для ног легко настраивается с учетом особенностей тела.
10. Подставка для стоп может вытягиваться или втягиваться в пределах 13,5 см, обеспечивая идеальное соответствие длины для людей разного роста.
11. Наличие механического привода и бесшумная эксплуатация позволят вам расслабиться в тишине.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ





- Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации, чтобы правильно установить и использовать массажное кресло.
- Знаки безопасности разделяются на две группы: предупредительные надписи «осторожно» и «внимание».
Прежде чем включить вилку в розетку, убедитесь в том, что выключатель питания находится в положении «ВЫКЛ».




	Осторожно	Данный знак означает «предупреждение о возможности причинения смерти или травм».	
	Внимание	Данный знак означает «предостережение о возможности травм или повреждения оборудования».	
	Данный знак означает «действие запрещено».		Данный знак означает «самостоятельная сборка запрещена».
	Данный знак означает «соблюдайте инструкции при эксплуатации».		Данный знак означает «правильное подключение кабеля».


МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

 Осторожно	
	<p>Следующие категории людей должны проконсультироваться с врачом перед использованием массажного кресла:</p> <p>Лица с онкологическими заболеваниями;</p> <p>Лица, страдающие остеопорозом;</p> <p>Беременные женщины и женщины в период менструации;</p> <p>Лица, имеющие открытые раны или кожные заболевания;</p> <p>Лица с острыми заболеваниями;</p> <p>Лица, страдающие диабетом;</p> <p>Пациенты с дефектами позвоночника;</p> <p>Лица с электрокардиостимулятором и аналогичными приборами;</p> <p>Лица, нуждающиеся в уходе или испытывающие дискомфорт;</p> <p>Пациенты с тромбами, тяжелой формой аневризмы, острой формой венозной аневризмы, нарушениями кровообращения, кожными заболеваниями и инфекциями, или лица, которым противопоказаны массажные процедуры в соответствии с врачебными предписаниями.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Если во время процедуры Вы испытываете недомогание или ощущаете дискомфорт, проконсультируйтесь с врачом во избежание несчастных случаев или причинения вреда Вашему здоровью.
	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь в отсутствии людей, животных и предметов в области (за, под или перед) кресла, прежде чем поднять/опустить спинку, опору для ног или использовать функцию регулирования опоры для ног в соответствии с ростом.
	<ul style="list-style-type: none"> • Не массируйте область головы слишком долго.
	<ul style="list-style-type: none"> • Перед эксплуатацией внимательно проверьте кресло на наличие повреждений (в том числе незначительных) и дефектов. При обнаружении повреждений отключите питание кресла для его ремонта (не продолжайте использовать кресло в данном случае).
	<ul style="list-style-type: none"> • Следите за тем, чтобы дети не использовали массажер и не играли с ним: сидеть на спинке или подлокотнике кресла также запрещено. • Во избежание несчастного случая или травмы массажное кресло запрещено использовать лицам с ограниченными возможностями или лицам, которые не в состоянии быстро отреагировать на ситуацию.
	<ul style="list-style-type: none"> • Запрещено использовать кабель, вилку и розетку питания в случае их повреждения или неплотного контакта. • Во избежание возгорания, поражения электрическим током и иных повреждений напряжение питания должно соответствовать номинальному. • Запрещено использовать поврежденный, модифицированный, запутанный, скрученный и пережатый сетевой шнур под большой нагрузкой, в особенности под массажным креслом; не допускается хранение массажной подушки и других деталей в сложенном состоянии – это может стать причиной короткого замыкания, возгорания или удара электрическим током.
	<ul style="list-style-type: none"> • При возникновении любых неполадок ремонт массажного кресла должен выполняться квалифицированным специалистом. Запрещено самостоятельно изменять конструкцию, разбирать или производить техническое обслуживание изделия. • Если силовой шнур поврежден, не заменяйте его самостоятельно, а свяжитесь с нашим представительством или авторизованным дилером для замены шнура.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

 Внимание	
	<ul style="list-style-type: none"> Во избежание падения эксплуатация массажного кресла осуществляется на плоской и ровной поверхности.
	<ul style="list-style-type: none"> Во избежание несчастного случая или травмы, прежде чем сесть в кресло, убедитесь в том, что массажные головки располагаются правильно.
	<ul style="list-style-type: none"> Рекомендованная продолжительность сеанса массажа составляет 20 минут, не более 5 минут для каждой зоны. Следует начинать массаж постепенно, продвигаясь небольшими «шагами»: продолжительный непрерывный массаж в одном положении может вызвать неприятные ощущения.
	<ul style="list-style-type: none"> После использования массажера выключите переключатель на задней панели для обеспечения безопасности детей.
	<ul style="list-style-type: none"> В целях безопасности вставьте вилку в розетку с проводом заземления: в случае утечки тока или поражения током разъем провода заземления не погнется и не выпадет. 
	<ul style="list-style-type: none"> Запрещено надавливать на массажные головки руками и наступать на них. Запрещено класть руки между работающими массажными головками. Запрещено помещать конечности между механических деталей. Запрещено стоять, сидеть или класть что-либо на спинку, подлокотник или опору для ног. Запрещено перемещать кресло в процессе работы. Запрещено класть руки или голову между опорами для ног или под них. Перед массажем снимите все заколки и шпильки. Перед массажем области бедер следует достать твердые предметы из карманов. Запрещено вынимать разъем или отключать питание кресла в процессе работы.
	<ul style="list-style-type: none"> Не засыпайте во время работы кресла Не используйте массажное кресло в состоянии алкогольного опьянения и при плохом самочувствии.
	<ul style="list-style-type: none"> Не допускайте попадания воды, пыли и другого мусора на разъем питания, это может стать причиной возгорания, удара током или короткого замыкания.
	<ul style="list-style-type: none"> Строго запрещено использовать массажное кресло на нагреваемых предметах, как, например, электрическое одеяло, во избежание риска возгорания.
	<ul style="list-style-type: none"> Запрещено вставлять или иным образом допускать попадание посторонних предметов в гнездо массажного кресла в случае его повреждения.
<ul style="list-style-type: none"> Избегайте попадания на массажное кресло прямых солнечных лучей; не устанавливайте его вблизи плит, печей, отопительных систем. Это может привести к выцветанию кожаных поверхностей. 	

 Внимание	
	<ul style="list-style-type: none"> • Не следует использовать или хранить изделие в помещениях с повышенной влажностью, например, плавательном бассейне, ванной и др. • Не допускайте попадания влаги на панель управления и само кресло. Запрещено использовать кресло в сырой одежде во избежание поражения электрическим током или утечки тока.
	<ul style="list-style-type: none"> • Прежде чем приступить к ремонту или очистке кресла, отключите питание. Запрещено касаться разъема мокрыми руками во избежание поражения электрическим током или иных травм.
	<ul style="list-style-type: none"> • В случае прекращения подачи электроэнергии немедленно выключите переключатель во избежание возможных несчастных случаев или травм при возобновлении питания.
	<ul style="list-style-type: none"> • При отключении извлекайте из розетки РАЗЪЕМ, вместо того, чтобы тянуть за шнур питания во избежание падения разъема или проблем, связанных с ударом электрическим током.

 <p>очистка</p>	<ul style="list-style-type: none"> • При нормальной эксплуатации очистите изделие сухой тряпкой. Не допускается применение химических моющих средств. • В случае значительных загрязнений или скоплений пыли используйте мягкую ветошь, теплую воду и нейтральное моющее средство. Затем повторно протрите выжатой сухой тряпкой. Дайте креслу высохнуть естественным образом. Запрещено использовать для очистки спиртовой или бензиновый растворитель
--	---


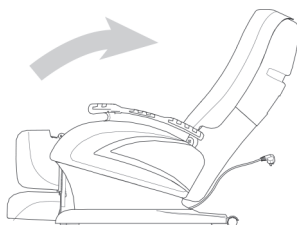
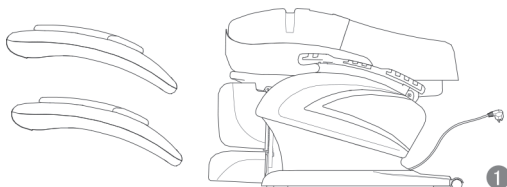
 <p>Использование провода заземления недопустимо</p>	<p>Газопровод: вероятность взрыва или возгорания.</p> <p>Телефонный кабель и молниеотвод: вероятность удара электрическим током и возгорания в случае грозы.</p> <p>Водопровод: провод заземления бесполезен, т.к. трубы выполнены из пластика.</p>
--	---

СХЕМА УСТАНОВКИ

Этап 1

Достаньте кресло, правый и левый подлокотники из упаковочной коробки с помощью одного или нескольких помощников. Медленно извлеките кресло, удерживая его за подлокотники с обеих сторон.



Этап 2

Опускайте спинку кресла до тех пор, пока не образуется угол, равный приблизительно 110° . Спинка фиксируется в правильном положении со звуком щелчка.

Этап 3

Подключите воздуховод на корпусе подлокотника к входному концу трубы на крышке подлокотника. Соедините подлокотник с деталями для подачи воздуха на корпусе подлокотника. Следите за тем, чтобы воздушная трубка полностью входила в квадратный рукав деталей для подачи воздуха в случае повреждения воздуховода, протолкните ее вперед и закрепите с помощью винта.

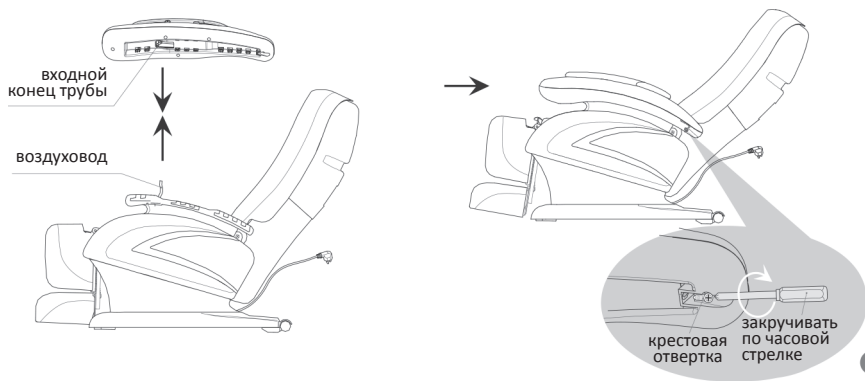


СХЕМА УСТАНОВКИ

Этап 4

Соедините подушку для спины и подушку для головы с спинкой кресла.


Соедините подушку для головы и спинку с помощью застежки «липучки»

Соедините подушку для спины и спинку с помощью застежки-молнии

Спинка кресла

Подушка для головы

Подушка для спины

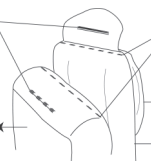

Этап 5

Отвинтите гайку и плоскую шайбу, закрепленные на опоре пульта ДУ, вставьте опору в отверстие с внешней стороны пластмассовой части подлокотника, навинтите гайку и закрепите плоскую шайбу и гайку с внутренней стороны подлокотника. Зафиксируйте пульт ДУ с помощью кронштейна.

Пульт дистанционного управления

Отверстие для вставки опоры


Поворотный пульт дистанционного управления

Плоская шайба
Пружинная шайба
Гайка




Этап 6


После завершения сборки включите питание, разомкните переключатель в нижней части спинки кресла. Выберите нужную функцию с помощью пульта дистанционного управления и наслаждайтесь деликатным и расслабляющим массажем.

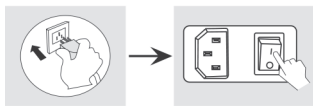


ВНЕШНИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

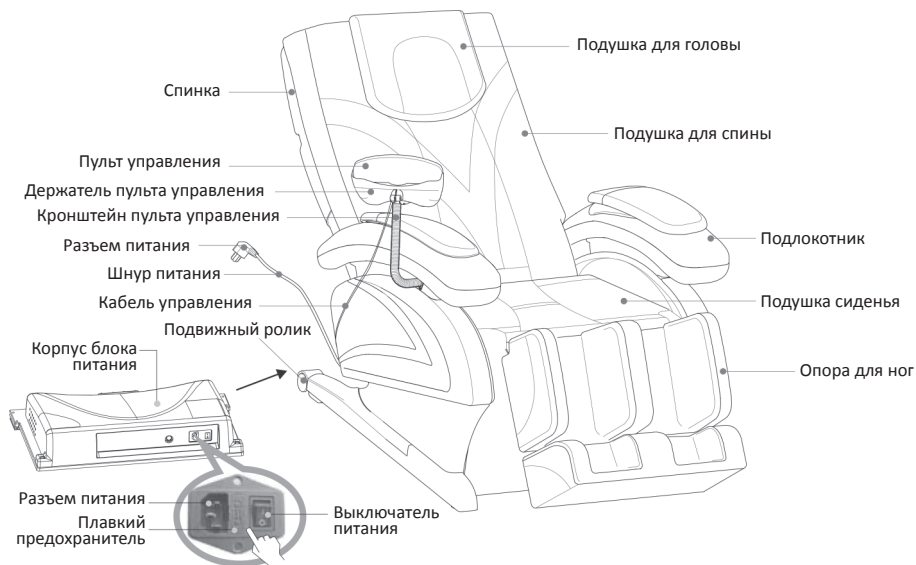

ВНУТРЕННИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

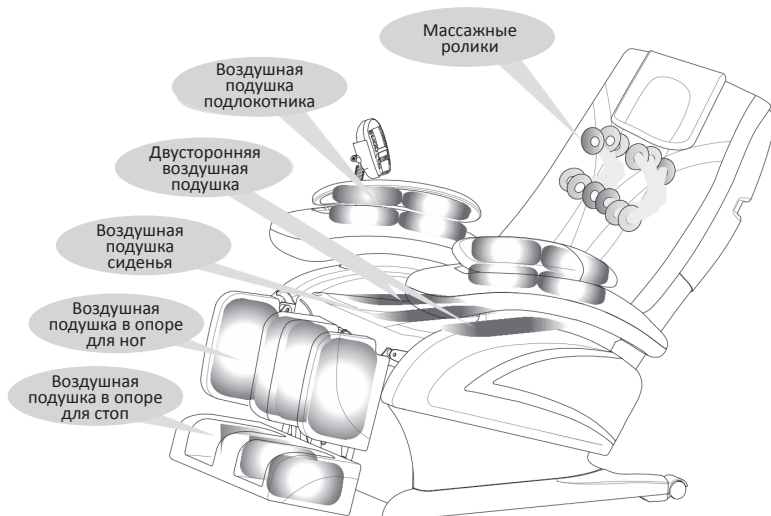

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

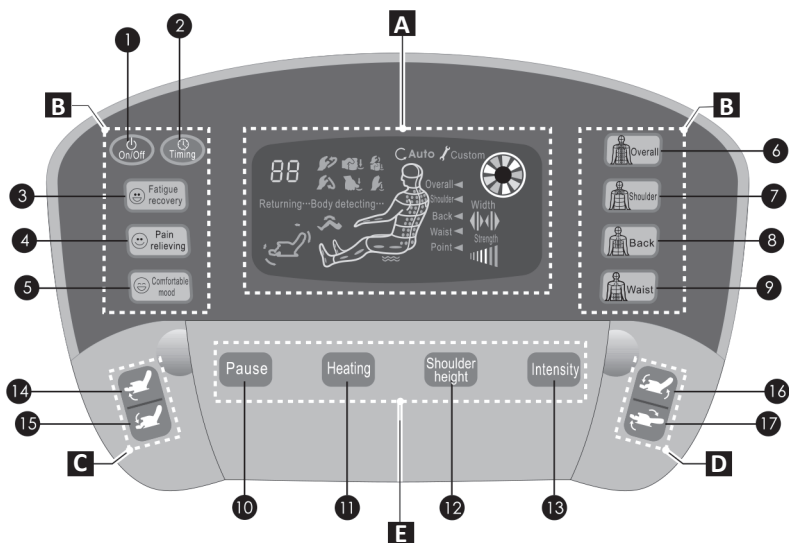

A. Вакуумный люминесцентный дисплей (ВФД)


B. Автоматическая программа массажа спины

C. Подъем/опускание опоры для ног







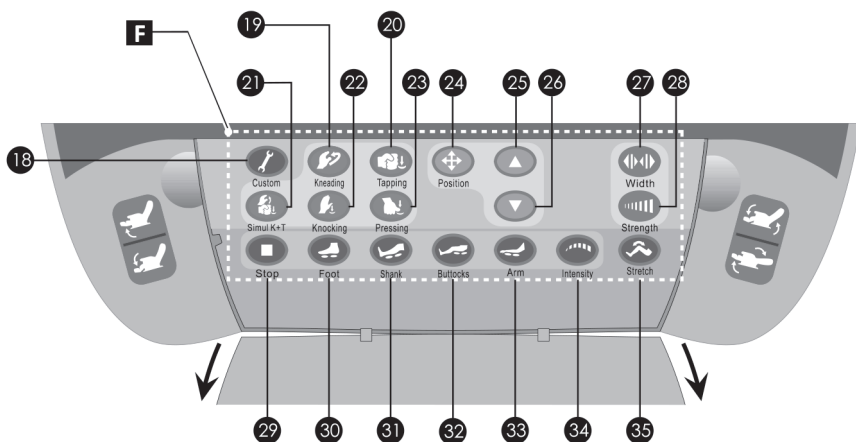












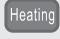


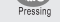
D. Подъем/опускание спинки

E. Воздушно-компрессионный массаж

F. Ручное управление под активной защелкивающейся крышкой



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

	1. Вкл/выкл (On/Off): Включите/выключите массажный механизм при включенном питании. Время работы, установленное по умолчанию – 20 минут. Загораются индикаторы «полный курс» (full course), «плечи» (shoulder), «спина» (back), «поясница» (waist). Вы можете выбрать автоматическую программу массажа, нажав на одну из соответствующих клавиш. Далее загораются индикаторы «снятие усталости» (fatigue recovery), «облегчение боли» (pain relieving) и «расслабление» (comfortable mood). Выберите любой из вариантов. Массажный механизм запускается автоматически после выбора режима. Чтобы выбрать режим массажа вручную, откройте крышку под экраном и нажмите кнопку «режим пользователя» (custom). После выключения питания массажный механизм автоматически сохраняет настройки.
	2. Настройка времени (Timing): Включите питание. Предварительно установленное время составляет 20 минут. Нажмите на клавишу. Значение изменяется на 30 минут. После повторного нажатия время изменяется на 10 минут.
	3. Снятие усталости (Fatigue recovery): В рабочем режиме нажмите на данную клавишу для активации функции «Снятие усталости» (Fatigue recovery).
	4. Облегчение боли (Pain relieving): В автоматическом режиме нажмите на данную клавишу для активации функции «Облегчение боли» (Pain relieving).
	5. Расслабление (Comfortable mood): В автоматическом режиме нажмите на данную клавишу для активации функции «Расслабление» (Comfortable mood).
	6. Общий массаж (Overall): Во включенном состоянии (ON) нажмите на данную клавишу для автоматического выбора полного цикла массажа верхней части тела.
	7. Плечи (Shoulder): Во включенном состоянии (ON) нажмите на данную клавишу для автоматического выбора массажа плеч.
	8. Спина (Back): Во включенном состоянии (ON) нажмите на данную клавишу для автоматического выбора массажа спины.
	9. Поясница (Waist): Во включенном состоянии (ON) нажмите на данную клавишу для автоматического выбора массажа поясницы.
	10. Пауза (Pause): В автоматическом режиме нажмите на данную клавишу, чтобы приостановить массаж в автоматическом режиме. Нажмите на клавишу повторно для возобновления массажа.
	11. Разогревание (Heating): Во включенном режиме (On) нажмите на данную клавишу для включения/выключения функции разогревания поясничной области и ступней.
	12. Высота расположения плеч (Shoulder height): Во включенном режиме (On) нажмите на данную клавишу, чтобы отрегулировать (выше/ниже) положение для массажа плеч. Отображаются значения H5-1.
	13. Интенсивность (Intensity): В режиме воздушно-компрессионного массажа нажмите на данную клавишу для выбора интенсивности воздушно-компрессионного массажа.
	14. Нажмите на данную клавишу, чтобы поднять опору для ног. Отпустите клавишу для остановки действия.
	15. Нажмите на данную клавишу, чтобы опустить опору для ног. Отпустите клавишу для остановки действия.
	16. Нажмите на данную клавишу, чтобы поднять спинку и опустить опору для ног. Отпустите клавишу для остановки действия.
	17. Нажмите на данную клавишу, чтобы опустить спинку и поднять опору для ног. Отпустите клавишу для остановки действия.
	18. Режим пользователя (Custom): Во включенном режиме (On) нажмите на данную клавишу для выбора нужной массажной функции вручную.
	19. Разминающий массаж (Kneading): В «Режиме пользователя» (Custom) нажмите на данную клавишу, чтобы начать разминающий массаж.
	20. Постукивающий массаж (Tapping): В «Режиме пользователя» (Custom) нажмите на данную клавишу, чтобы начать постукивающий массаж.
	21. Разминающий + постукивающий массаж (Simul k+t): В «Режиме пользователя» (Custom) нажмите на данную клавишу, чтобы начать массаж, сочетающий разминающий и постукивающий приемы.
	22. Поколачивающий массаж (Knocking): В «Режиме пользователя» (Custom) нажмите на данную клавишу, чтобы начать поколачивающий массаж.
	23. Давящий массаж (Pressing): В «Режиме пользователя» (Custom) нажмите на данную клавишу, чтобы начать давящий массаж.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

	24. Положение (Position): В «Режиме пользователя» (Custom) нажмите на данную клавишу, чтобы выбрать массажное положение, например, полный курс, плечи, спина, поясница или заданное положение.
	25. В «Режиме пользователя» (Custom) при выборе «заданного массажного положения» (fixed massage position) нажмите на данную клавишу, чтобы слегка передвинуть положение вверх.
	26. В «Режиме пользователя» (Custom) при выборе «заданного массажного положения» (fixed massage position) нажмите на данную клавишу, чтобы слегка передвинуть положение вниз.
	27. Ширина (Width): В «Режиме пользователя» (Custom) при выборе «функция точечного, давящего, постукивающего массажа» (tapping, pressing, hitting function) нажмите на данную клавишу, чтобы отрегулировать расстояние между двумя блоками роликов.
	28. Сила (Strength): В «Режиме пользователя» (Custom) при выборе «функция разминающего, точечного, разминающего + точечного, постукивающего массажа» (kneading, tapping, kneading + tapping, hitting function) нажмите на данную клавишу, чтобы отрегулировать интенсивность массажа.
	29. Остановка (Stop): Нажмите на данную клавишу для остановки воздушно-компрессионного массажа стоп, голени, бедер и рук.
	30. Стопы (Foot): Во включенном режиме (ON) нажмите на данную клавишу для включения/выключения воздушно-компрессионного массажа стоп.
	31. Голени (Shank): Во включенном режиме (ON) нажмите на данную клавишу для включения/выключения воздушно-компрессионного массажа голеней.
	32. Бедра и ягодицы (Buttocks): Во включенном режиме (ON) нажмите на данную клавишу для включения/выключения воздушно-компрессионного массажа области бедер.
	33. Руки (Arm): Во включенном режиме (ON) нажмите на данную клавишу для включения/выключения воздушно-компрессионного массажа рук.
	34. Интенсивность (Intensity): При включенном режиме воздушно-компрессионного массажа (ON) нажмите на данную клавишу для регулирования интенсивности массажа стоп, голеней, бедер и рук.
	35. Растяжка (Stretch): В Автоматическом (Auto) режиме воздушно-компрессионного массажа нажмите на данную клавишу для включения/выключения функции растяжки голеней.

Обозначения ВФД-дисплея

Цифровой дисплей: индикация ожидания в состоянии «_ _» показывает итоговое время работы. При включенном режиме воздушно-компрессионного массажа (ON) нажмите на клавишу «автоматического режима» (Auto) воздушно-компрессионного массажа. На дисплее отобразится значение «Au». Нажмите на клавишу «Интенсивность» (Intensity). На дисплее отображаются значения «E1», «E2», «E3», «E4», показывающие различные степени интенсивности массажа. В случае сбоя отображается значение «Ошибка»

Функция		Kneading Разминающий массаж
		Tapping Постукивающий массаж
		Simul k+t Сочетание разминающего + постукивающего массажа
		Pressing Китайский точечный массаж (надавливание)
		Hitting Поклачивающий массаж

- Автоматический режим
- Режим пользователя



- Оранжевый – снятие усталости
- Зеленый – облегчение боли
- Синий – расслабление



Вверх/вниз

Растяжка ног

Положение воздушно-компрессионного массажа



Положение массажного ролика

Функция разогревания поясницы и ступней


- Overall ◀ Общий массаж
- Shoulder ◀ Плечи
- Back ◀ Спина
- Waist ◀ Поясница
- Point ◀ Точка массажа

МЕТОД РАБОТЫ И

• Процедура работы

Шаг 1. Включение питания

1. Вставьте разъем электропитания в розетку.
2. Нажмите кнопку на задней части корпуса блока питания. Контроллер показывает режим ожидания.

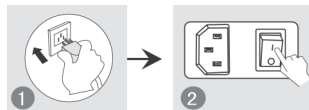


Шаг 2. Массаж

Выберите массажную функцию, следуя указаниям в разделе, посвященном работе пульта управления.


Шаг 3. Выключение питания



1. Включите/выключите клавишу на пульте управления для выключения механизма.
2. После возврата кресла в исходное положение выключите кнопку на задней панели корпуса блока питания.
3. Извлеките разъем электропитания из розетки.

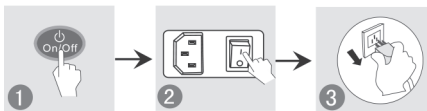


• Подъем/опускание спинки кресла

▶ Опускание спинки

Нажмите на клавишу  на пульте управления, чтобы опустить спинку и одновременно поднять опору для ног. Отпустите клавишу. Спинка и опора для ног зафиксированы в заданном положении.

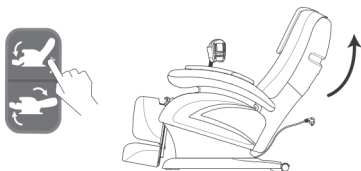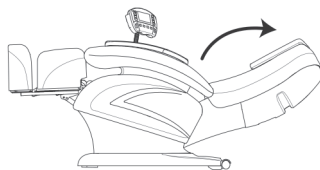


◀ Подъем спинки


Нажмите на клавишу  на пульте управления, чтобы поднять спинку и одновременно опустить опору для ног. Отпустите клавишу. Спинка и опора для ног зафиксированы в заданном положении.

СХЕМАТИЧНОЕ ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ


• Подъем/опускание опоры для ног

▶ Опускание опоры для ног

Нажмите на клавишу «» на пульте управления, чтобы медленно опустить опору для ног. Отпустите клавишу. Опора для ног зафиксируется в заданном положении.

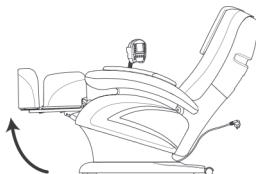

◀ Подъем опоры для ног


Нажмите на клавишу «» на пульте управления, чтобы медленно поднять опору для ног. Отпустите клавишу. Опора для ног зафиксируется в заданном положении.

• Удлинение/укорачивание опоры для ног

▶ Удлинение опоры для ног

Длина опоры для ног может быть увеличена в пределах 13,50 см посредством вытягивания опор.

Диапазон вытягивания –
13,50 см

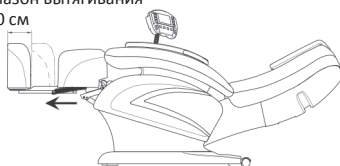

Диапазон вытягивания –
13,50 см



◀ Укорачивание опоры для ног

Длина опоры для ног может быть уменьшена в пределах 13,50 см посредством складывания опор.




Убедитесь в отсутствии людей, животных или предметов в пределах допустимого диапазона, предусмотренного для спинки и опоры для ног во избежание причинения вреда или ущерба по неосторожности. Выполняя регулировку спинки, следите за зазором между спинкой и подлокотником.

Метод работы и схематичное описание функций

• Массаж рук

Откройте верхнюю крышку подлокотника. Положите руки на подлокотники. Нажмите на клавишу «автоматический режим» (auto) на пульте управления или клавишу «массаж рук» (arm) под активной защелкивающейся крышкой и наслаждайтесь воздушно-компрессионным массажем.

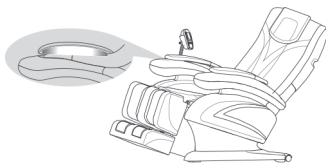


• Распознавание плечевой области

Правильное положение для распознавания плечевой области: спина плотно прилегает к спинке кресла, голова – к подушке. Массажные ролики распознают плечевую область автоматически.



• Перемещение

Выключите питание и отсоедините разъем (во избежание повреждения спинки кресла при его перемещении рекомендуется сложить кресло в положение для хранения). Надавите на спинку кресла, как показано на рисунке. Осторожно толкайте кресло вперед с помощью роликов, слегка наклонив его.

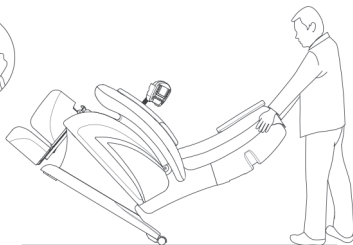

Примечание

Необходимо свернуть шнур питания и положить его на сиденье во избежание повреждения последнего при перемещении.


Передвигайте кресло постепенно – в противном случае небрежное обращение может стать причиной повреждения некоторых деталей изделия.

Не используйте ролики на неровной поверхности.

Не следует толкать кресло по деревянному полу – ролики могут поцарапать его поверхность. При необходимости передвигайте кресло с одним или несколькими помощниками.

• Рекомендации

Длительное давление от собственного веса кресла может оставить на полу царапины. Для защиты пола следует подложить под кресло ковер или аналогичное мягкое покрытие.

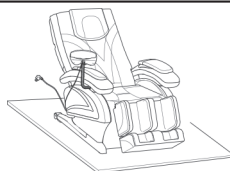

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ.

Поиск и устранение неисправностей.

Проблема	Возможная причина	Устранение
Массажное кресло не работает после включения	Проверьте, включен ли переключатель; Убедитесь в том, что выбрана массажная функция; Убедитесь, что разъем питания плотно вставлен в розетку.	Разомкните переключатель управления; Выберите массажную функцию; Проверьте разъем и розетку
Звуковой сигнал внутри массажера во время работы	Звук может быть вызван работой воздушного насоса, двигателя и механических деталей	Это нормально. Вмешательство не требуется.
Левая и правая массажные головки расположены на разной высоте	Массажные головки работают попеременно	Это нормально. Вмешательство не требуется.
Массажная функция неожиданно выключается во время работы кресла	Время установки истекло	Выключите питание и дайте массажеру «отдохнуть» в течение получаса перед следующим запуском.
Невозможно опустить спинку и опору для ног	Проверьте на наличие препятствий. Существует вероятность перегрузки массажного механизма. Иногда массажный механизм может автоматически выключаться в целях безопасности.	Устраните препятствия. Выключите питание и дайте массажеру «отдохнуть» в течение получаса перед следующим запуском.
Кресло не возвращается в исходное положение	Перегрузка. Время установки истекло.	Выключите питание и дайте массажеру «отдохнуть» в течение получаса перед следующим запуском.
После включения кнопки на задней панели блока питания индикатор питания не загорается	Убедитесь, что разъем питания плотно вставлен в розетку. Проверьте, не перегорел ли плавкий предохранитель.	Плотно вставьте разъем в розетку. При необходимости замените плавкий предохранитель в соответствии со спецификацией.




Примечание: Если проблемы вызваны причинами, отличными от вышеперечисленных, выключите переключатель питания и отсоедините шнур питания, после чего свяжитесь с производителем или представителем по обслуживанию для выполнения ремонта или технического обслуживания Вашего кресла.

Технические параметры

Наименование	Массажное кресло Venerdi Amato	Номинальная мощность	260 Вт
Модель	RK2106G	Вес: нетто/брутто	76/92 кг
Входное напряжение	120 В перем. тока, 60 Гц <input type="checkbox"/> 240 В перем. тока, 50 Гц <input type="checkbox"/> 220 В перем. тока, 50/60 Гц <input type="checkbox"/>	Габаритные размеры: (ДхШхВ)	1160 X 840 X 855 мм
Рабочее напряжение	110 В пост. тока	Класс безопасности	Класс I

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ

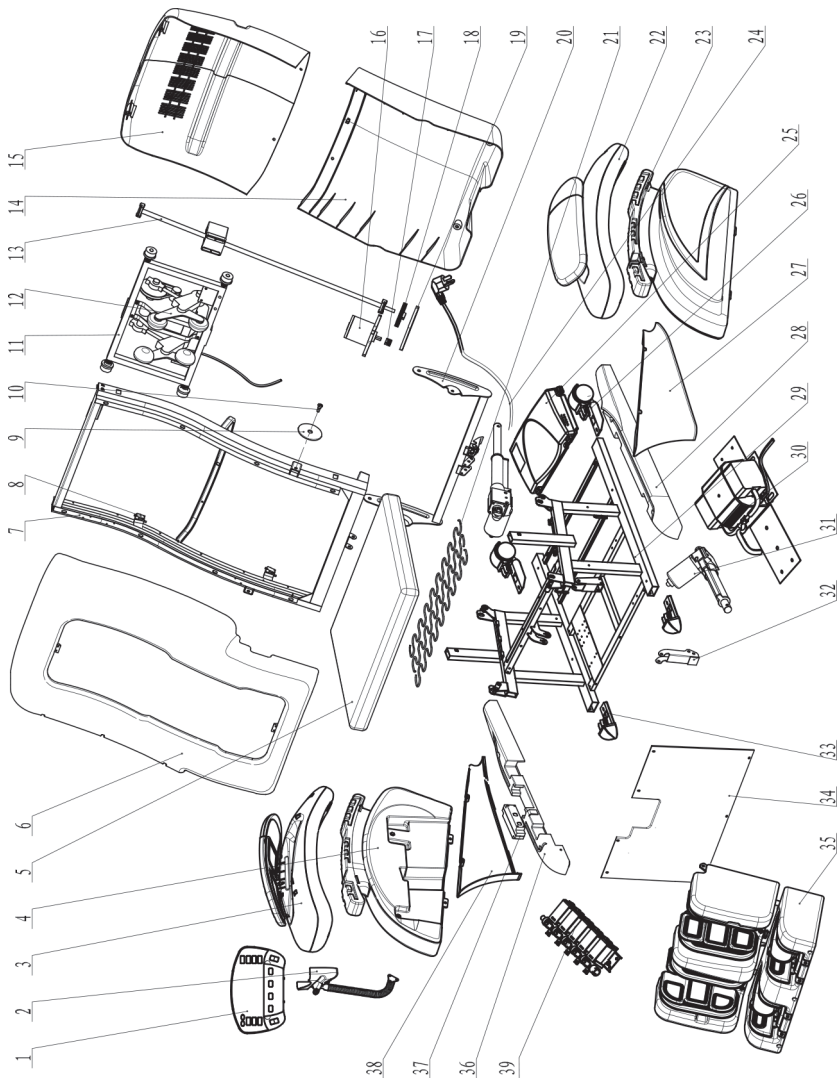

ПЕРЕЧЕНЬ МЕХАНИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ

№	Наименование	Кол-во (шт.)	№	Наименование	Кол-во (шт.)
1	Пульт управления	1	2	Держатель пульта управления	1
3	Правый подлокотник	1	4	Основной блок правого подлокотника	1
5	Подушка сиденья	1	6	Пластмассовая часть спинки	1
7	Рама спинки	1	8	Переключатель подъема/опускания	2
9	Прокладка	2	10	Болт лестничного типа	2
11	Рама массажного механизма	1	12	Массажный механизм	1
13	Направляющий винт в сборе	1	14	Нижняя крышка	1
15	Верхняя крышка	1	16	Механизм подъема/опускания двигателя	1
17	Малое ременное колесо	1	18	Большое ременное колесо	1
19	Ремень	1	20	Поворотная рама	1
21	Пружина сиденья	1	22	Левый подлокотник	1
23	Основной блок левого подлокотника	1	24	Шнур питания	1
25	Корпус блока питания	1	26	Подвижный ролик	2
27	Панель левого подлокотника	1	28	Нижняя часть левого подлокотника	1
29	Рама сиденья	1	30	Воздушный насос в сборе	1
31	Электропривод	2	32	Контактная деталь	1
33	передний	2	34	Передняя панель	1
35	Опора для ног в сборе	1	36	Нижняя часть правого подлокотника	1
37	Корпус переключателя	1	38	Панель правого подлокотника	1

TAKASIMA

ООО «Медберри»

198095, Санкт-Петербург,
ул. Розенштейна, 21, лит. А, оф. 508

Телефон: +7 (812) 385-57-66

125362, Москва, ул. Водников, 2, стр.4

Телефон: +7 (495) 215-14-90

E-mail: office-medberry@medberry.ru

Бесплатный звонок для абонентов РФ:

Телефон: 8 (800) 555-3-800



www.takasima.ru