

# Антихрап WELSS WS 5070

Благодарим Вас за выбор  
данного продукта.

## Описание

Это революционное устройство, предназначенное для уменьшения храпа, с помощью нового процесса стимуляции нервных импульсов. Работа браслета основана на том, что при обнаружении датчиком прибора храпа, устройство посылает на кожу человека электронные импульсы, в результате чего «храпящий» меняет положение, в котором он спит, либо напрягает мышцы гортани. Именно смена положения тела или головы и способствует прекращению храпа.


## Антихрап WELSS 5070:

- Не нарушает сна.
- Избавляет от храпа за несколько недель.
- Безопасен.
- Не имеет побочных эффектов.
- Прост в использовании.
- Автоматически выключается через 8 часов использования.

Устройство компактное (вес около 40 гр.), выглядит как наручные часы и не доставляет никаких неудобств во время сна. Выглядит эстетично, не вызывает смущения или чувства неловкости во время использования. Подходит как мужчинам, так и женщинам.

Перед использованием Антихрапа WELSS 5070 рекомендуется проконсультироваться с врачом. Как сказано выше, устройство безопасно, но имеют противопоказания: наличие кардиостимулятора, пейсмейкера в качестве имплантата, нахождение человека под каким либо электронным наблюдением (по медицинским показаниям).


## Устройство

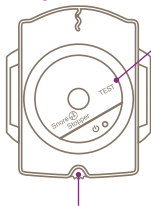

Test - тестирование (кнопка для проверки интенсивности импульсов)

Turn on/off switch button - колесико для включения/выключения прибора, а также выбора мощности.

Black conductive rubber - электропроводящий блок

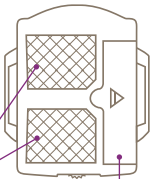

Batteries cover - емкость для батареек

## Использование

- Установите элемент питания типа AAA в устройство
- Наденьте устройство и зафиксируйте его застежками-липучками.
- Включите Антихрап, переключив ролик «Power/Start», со значения «0» на 1, при этом замигает зеленый индикатор.
- Установите комфортную интенсивность посылаемых импульсов от 1 до 7.
- Интенсивность посылаемых импульсов проверяем с помощью кнопки «Test», для этого достаточно нажать кнопку «Test» на включенном

устройстве и при выбранном режиме интенсивности.

- Зеленый индикатор будет мигать во время работы устройства.
- Для отключения прибора необходимо переключить ролик «Power/Start» в положение «0».
- После использования устройства рекомендуется протереть его влажной салфеткой.

## **Важно**

Храните прибор при комнатной температуре в сухом, темном и недоступном для детей месте.

## **Технические характеристики:**

Выходная мощность 18vA/0.2Hz.

Время работы 8 часов (авт. откл.).

Батарея 1.5 AAA 1шт (в комплект не входит).

Размер:5x6x1.5см.

Вес: 40гр.

**Температурный режим работы:**  
10-50°C

**Влажность:** 10-95%.

**Комплектация:** упаковка,  
устройство, браслет, гелевые  
пластинки, мини отвертка,  
инструкция.

**Импортер:** ООО «Дэливер»,  
Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 3  
Гарантийный срок: 12 месяцев со  
дня покупки

**Телефон сервисного центра:**

+7 (495) 774-57-14

**Завод изготовитель:**

Shenzhen Wochuan Electronic  
Co.,Ltd, China/ Вочуань  
Электроник , Шэньчжэнь, Китай

[www.welss.ru](http://www.welss.ru)





Антихрап  
WELSS WS 5070



WS 5070